

Oxivir[®] Excel[™] Wipe CE

Breed spectrum reiniging & desinfectie wipe voor medische materialen en -hulpmiddelen en niet poreuze medische oppervlakken.

Omschrijving

De Oxivir Excel Wipe CE is een gebruiksklare, één stappen reiniger en desinfecterende wipe, met een breed effectiviteits spectrum en korte contacttijden. Gebaseerd op Diversey Care's gepatenteerde waterstofperoxide formulering. Oxivir Excel Wipe kan gebruikt worden op medische hulpmiddelen en materialen en niet poreuze, harde oppervlakken.

Belangrijke eigenschappen

- Bacterie-, virus- en gisdodend
- Effectieve reiniger
- Desinfecteert in één minuut
- Gebruiksvriendelijk en veilig
- Gemakkelijk in gebruik, vereist geen voorbereiding en hoeft niet naar de wasserette
- Geurloos
- De actieve stof wordt afgebroken in water en zuurstof
- Naspoelen niet nodig

Voordelen



- De brede effectiviteit geeft het hoogste niveau voor patiënt bescherming
- Uitgebreid getest op Europese normen en effectief tegen meerdere belangrijke pathogene, het product heeft een volledig virus claim, inclusief het Poliovirus, Adenovirus, en Murine Norovirus. Het product wordt beschouwd als effectief tegen alle envelopped virussen zoals; HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus en Coronavirus
- Korte contacttijden zorgen ervoor dat het oppervlak vochtig kan blijven om het desinfecteren te kunnen garanderen
- Uitstekende reinigende werking
- Veilig voor gebruik bij patiënten, bezoekers, niet irriterend voor ogen en de huid
- Simpel en makkelijk en gedoseerd te gebruiken oplossing die doseringsfouten uitsluit
- Geen gevaar van kruisbesmetting dankzij de Wipe voor eenmalig gebruik
- AHP formulering is mild voor oppervlaktes en verlengt de levensduur van het materiaal
- Geschikt voor gebruik in hoog risico gebieden zoals Gezondheidszorg inclusief de OK, IC, Neonatologie en patiëntenkamers

Gebruiksaanwijzing

Reiniging en desinfectie

1. Verwijder grove vervuiling
2. Open de verpakking wipes, haal er één wipe uit en sluit de verpakking
3. Veeg over het materiaal of oppervlak en zorg dat het gehele oppervlak vochtig wordt
4. Zorg ervoor dat het materiaal of oppervlak vochtig blijft voor de duur van de contacttijd
5. Laat het oppervlak aan de lucht drogen
6. Vervang de wipe als het materiaal of oppervlak niet meer vochtig wordt, het visueel vervuild is of als er een andere ruimte gereinigd gaat worden

Belangrijk: Mix niet met andere producten. Gebruik niet op oppervlakken die gevoelig zijn voor water of zuur.

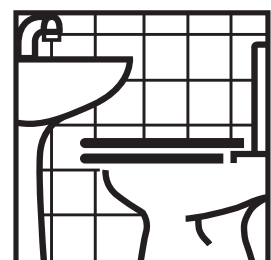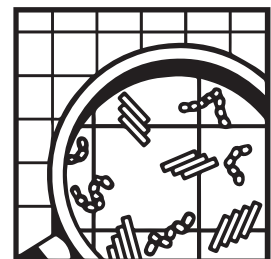

© A.I.S.E.

Oxivir[®] Excel[™] Wipe CE

Breed spectrum reiniging & desinfectie wipe voor medische materialen en -hulpmiddelen en niet poreuze medische oppervlakken.

Technische gegevens

Uiterlijk:	Polypropylene wipe
Relatieve dichtheid [20 °C]:	1,000
pH-waarde in gebruik:	1,95
Houdbaarheid:	720 dagen
Geur:	neutraal

De bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilig gebruik en opslag informatie

Vermijd extreme temperaturen. Reageert op oxideerbare stoffen. De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product worden beschreven in het Veiligheidsinformatieblad.

Product Compatibiliteit

Onder de geadviseerde gebruikers condities, is Diversey Oxivir Excel Wipe geschikt voor gebruik op de meeste voorkomende materialen.

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve stoffen gebruikt in dit product zijn uiteindelijk biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de eis van de EU detergent richtlijnen, EC 648/2004.

Microbiologische data

Effectiviteit is bewezen in compliance met: EN13727, EN13624, EN14476

Werking

Bacteriedodend	RTU
Virusdodend	RTU
Gistdodend	RTU

Contacttijd

5 min
5 min
30 sec