



Oxivir Excel® Wipe CE

Breed spectrum reinigings- en desinfectiedoekjes

Omschrijving

De Oxivir Excel Wipe CE is een gebruiksklare, één stappen reiniger en desinfecterend doekje, met een breed effectiviteits spectrum en korte contacttijden. Gebaseerd op Diversey's gepatenteerde waterstofperoxide formulering. Oxivir Excel Wipe CE kan gebruikt worden op medische hulpmiddelen en materialen en op niet poreuze, harde oppervlakken.

Eigenschappen

- Bacterie-, virus- en gistdodend
- Effectieve reiniger
- Desinfecteert in één minuut
- Gebruiksvriendelijk en veilig
- Gemakkelijk in gebruik, vereist geen voorbereiding en hoeft niet naar de wasserij
- Geurloos
- De actieve stof wordt afgebroken in water en zuurstof
- Naspoelen niet nodig

Voordelen

- De brede effectiviteit geeft het hoogste niveau voor patiënt bescherming
 - Uitgebreid getest op Europese normen en effectief tegen meerdere belangrijke pathogene, het product heeft een volledig virus claim, inclusief het Poliovirus, Adenovirus, en Murine Norovirus. Het product wordt beschouwd als effectief tegen alle envelopped virussen zoals; HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus en Coronavirus
 - Korte contacttijden zorgen ervoor dat het oppervlak vochtig kan blijven om het desinfecteren te kunnen garanderen
 - Uitstekende reinigende werking
 - Veilig voor gebruik bij patiënten, bezoekers, niet irriterend voor ogen en de huid
 - AHP formulering is mild voor oppervlaktes en verlengt de levensduur van het materiaal
 - Geschikt voor gebruik in hoog risico gebieden zoals Gezondheidszorg inclusief de OK, IC, Neonatologie en patiëntenkamers
- Niet** bedoeld voor gebruik op invasieve medische hulpmiddelen


Gebruiksaanwijzing

1. Verwijder grove vervuiling.
2. Open de verpakking van de doekjes, haal er één doekje uit en sluit de verpakking.
3. Veeg over het materiaal of oppervlak en zorg dat het gehele oppervlak vochtig wordt, laat aan de lucht drogen.
4. Zorg ervoor dat het materiaal of oppervlak vochtig blijft voor de duur van de contacttijd
5. Vervang het doekje als het materiaal of oppervlak niet meer vochtig wordt, het visueel vervuild is of als er een andere ruimte gereinigd gaat worden

**De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor advies.*

CE
0088

AHP®
Patented

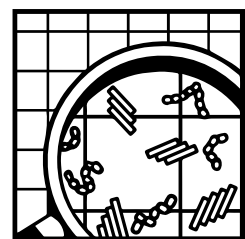

© A.I.S.E.



Oxivir Excel® Wipe CE

Technische gegevens

Uiterlijke kenmerken: Polypropyleen doekje

Geur: Neutraal

pH waarde (verdund): 1.95

Relatieve dichtheid (20°C): 1.000

Houdbaarheid: 720 dagen

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag

De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). <https://sds.diverse.com/>. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen. Uitsluitend voor professioneel gebruik. Reageert met oxideerbare stoffen.

Veilig gebruik

Niet mengen met andere producten. Gebruik niet op water- of zuurgevoelige oppervlakken.

Onder de geadviseerde gebruikers condities, is Diversey Oxivir Excel Wipe CE geschikt voor gebruik op de meeste voorkomende materialen.

Microbiologische gegevens

Effectiviteit is bewezen in compliance met: EN13727, EN13624, EN14476 en EN16615.

Werking Contacttijd

Bacteriedodend RTU 5 min

Virusdodend RTU 5 min

Gistdodend RTU 30 sec

Milieu-informatie

De oppervlakte-actieve bestanddelen die gebruikt worden in dit product zijn biologisch afbreekbaar in overeenstemming met de EU wetgeving voor reinigingsmiddelen, EC 648/2004.

Beschikbare verpakkingen

Diversey Oxivir Excel Wipe CE is beschikbaar in 12x100pc.